



Smilebryte

For Brighter Whiter Teeth

Professional Dental Whitening Kit

Οδηγίες Χρήσεως SmileBright Whitening Pen.

Περιστρέψτε το πίσω μέρος του στυλό για να κατέβει το υλικό λεύκανσης στο βουρτσάκι. Επαλείψτε μόνον το μπροστινό μέρος των δοντιών με απαλές κινήσεις. Μην τοποθετείτε το υλικό λεύκανσης στα ούλα ή σε άλλα ευαίσθητα σημεία. Αποφύγετε την κατάποση.

Μετά από 2 με 3 λεπτά ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αποφύγετε να φάτε ή να πιείτε αμέσως μετά την εφαρμογή και για τα πρώτα 30 λεπτά. Βουρτσίστε τα δόντια σας με μαγειρική σόδα ή με μια καλή λευκαντική οδοντόκρεμα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιείστε το μια φορά την ημέρα μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για πιο δύσκολες περιπτώσεις μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και 2 φορές την ημέρα.

Το αποτέλεσμα θα είναι ορατό σε 3 ημέρες. Συνεχίστε την εφαρμογή ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επαναλάβετε όποτε το θεωρείτε απαραίτητο.

Την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε επαλείψτε μόνο μια μικρή επιφάνεια των δοντιών. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ή αλλεργία σταματήστε την χρήση του και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Δεν ενδείκνυται η χρήση του σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στην διάρκεια του ύπνου.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Μην το καταπίνετε. Για μέγιστη διάρκεια φυλάξτε το στο ψυγείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το προϊόν δεν μπορεί να λευκάνει θήκες, σφραγίσματα και άλλα οδοντιατρικά πρόσθετα. Για μέγιστη διάρκεια φυλάξτε το υλικό λεύκανσης στο ψυγείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Συστατικά: Glycerin, Sodium Bicarbonate, Carbomer, Polysorbate 20, Triethanolamine, Potassium Sorbate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Pomegranate Extract, Chamomile Extract, Sodium Fluoride, Flavor.

Το προϊόν εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση